

Fehlerbehebungsanleitung

1. Gerät lässt sich nicht einschalten / Keine Reaktion beim Drücken der Tasten

- Batterieeinbau prüfen: Setzen Sie die Batterien korrekt mit positiver und negativer Polarität gemäß der Markierung im Inneren des Geräts ein.
- Batterieladung prüfen: Wenn die Batterien erschöpft sind, ersetzen Sie sie bitte durch brandneue Batterien.



2. Keine Messdaten oder ungenaue Anzeige

- Finger nicht tief eingelegt oder falsch platziert
- Häufige Fingerbewegungen während der Messung
- Zu lange Nägel, Nagellack und künstliche Nägel
- Kalte Hände oder feuchte Haut
- Starkes Umgebungslicht bestrahlt das Gerät und stört den Sensor

Lösungen

- Stecken Sie den Finger vollständig in das Pulsoximeter, wobei die Nagelseite nach oben zeigt
- Halten Sie die Hände entspannt und bleiben Sie während des Tests ruhig
- Halten Sie die Nägel kurz und sauber; verwenden Sie keinen Nagellack und keine Maniküre
- Wärmen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Messung
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und stark beleuchtete Umgebungen

3. Keine Datenanzeige oder großer Messfehler

- ✗ Lange Nägel, künstliche Nägel, Acrylnägel und Nagellack sind nicht zulässig. Insbesondere dunkler und metallischer Nagellack beeinträchtigt die Erkennung erheblich und führt zu ungenauen Daten.
- ✗ Halten Sie die Hände vor der Verwendung sauber und trocken. Feuchtigkeit und Fett an den Händen verringern die Sensorempfindlichkeit und führen zu instabilen Messdaten.
- ✗ Legen Sie vor dem Test Ringe, Armbänder und anderen Handschmuck ab und stellen Sie sicher, dass die Finger keinerlei Bedeckung aufweisen.

