



Guía de inicio rápido

Oxímetro de pulso para la yema del dedo

HOLFENRY

1



INSERTE EL DEDO:

Con la uña hacia arriba, inserte completamente el dedo en el dispositivo.



2



PULSE ENCENDIDO:

Pulse el botón para encender el dispositivo.



3



PERMANEZCA QUIETO:

Durante la medición, mantenga la mano y el cuerpo quietos.




4

LEA LOS RESULTADOS:

Mire la pantalla para ver SpO₂, la frecuencia del pulso y PI%.

Saturación de oxígeno (%SpO₂)

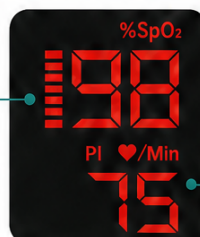

Frecuencia del pulso (PR) / Índice de perfusión (PI)

5

APAGADO AUTOMÁTICO:

Retire el dedo; el dispositivo se apagará automáticamente después de 8 segundos.



REFERENCIA DE PANTALLA

Saturación de oxígeno (%SpO₂)



Frecuencia del pulso (PR) / Índice de perfusión (PI)



Pulse el botón para cambiar entre la frecuencia del pulso y PI.



Nota: La uña debe orientarse hacia la cámara superior que contiene el sensor; inserte completamente el dedo en la cámara.



Para obtener mejores resultados, mantenga el dedo caliente, limpio y seco. No use esmalte de uñas.



Solo lea los datos cuando la lectura se mantenga estable.

